

Ihr Therapieplan

1

Erhalten Sie eine **persönliche Tinnitus-Diagnostik** durch Ihren HNO-Arzt.

Frequenz-Bestimmung beim HNO-Arzt zur Überprüfung der Tinnitus-Frequenz

2

3

Wenn Ihre Krankenversicherung Tinnitracks erstattet, dann geben Sie diesen **Aktivierungscode** ein:

AZ7MUT35
Muster

Sie erhalten Tinnitracks bei Ihrem HNO-Arzt.

Installieren Sie die **Tinnitracks-App** auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

4

5

Die **Tinnitracks Neuro-Therapie** beginnt und führt Sie durch die Behandlung.

Überprüfung der Frequenz beim HNO-Arzt 2 Wochen sowie 3, 6 und 9 Monate nach Therapiebeginn.

6

7

Abschluss-Untersuchung durch HNO-Arzt 12 Monate nach Beginn der Therapie

Die Tinnitus-App auf Rezept

Viele Krankenversicherungen übernehmen für Ihre Versicherten die Kosten für:

- ✓ Tinnitracks Neuro-Therapie Lizenz
- ✓ Diagnostik und Beratung durch einen teilnehmenden HNO-Arzt
- ✓ Präzise Frequenzbestimmung und regelmäßige Kontrolltermine durch einen teilnehmenden HNO-Arzt
- ✓ Folgebehandlung mit der Tinnitracks Basis-Therapie*

Eine aktuelle Liste aller Krankenversicherungen finden Sie auf

www.tinnitracks.com

service@tinnitracks.com

Frequenzbestimmungsübung unter:
www.tinnitracks.com/de/matching

Ihre ermittelte Tinnitus-Frequenz

Hz

Tinnitracks ist ein Produkt der Sonormed. Das vielfach ausgezeichnete Unternehmen entwickelt digitale Gesundheitslösungen, die den Patienten in den Mittelpunkt stellen.

Sonormed

Sonormed GmbH, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg
Geschäftsführer: Jörg Land, Matthias Lanz; HRB124315

* bei weiterem Therapiebedarf bzw. Eignung

123456

Tinnitracks

Tinnitracks Neuro-Therapie

Ihre Lieblingsmusik gegen Tinnitus

Von Krankenkassen erstattet

Tinnitracks

Die Tinnitracks Neuro-Therapie

Mit der Tinnitracks Neuro-Therapie können Sie Ihren Tinnitus nachhaltig leiser machen - einfach durch das Hören Ihrer eigenen Lieblingsmusik.

Ihre Lieblingsmusik wird dabei speziell für Ihre Tinnitus-Frequenz analysiert, gefiltert und optimiert. Die Therapiewirkung ist wissenschaftlich bestätigt.* So wird die Ursache Ihres Tinnitus gezielt behandelt.

Die Neuro-Therapie ist Teil der prämierten Tinnitracks App und wird von HNO-Ärzten verordnet und von Krankenkassen erstattet.

Anwendung

Geben Sie Ihre aktuelle Tinnitus-Frequenz ein und beginnen Sie die Therapie mit der Tinnitracks App:


- 1 Lassen Sie Ihre eigene Lieblingsmusik analysieren und filtern.
- 2 Hören Sie zur Therapie Ihre gefilterte Lieblingsmusik über Kopfhörer

Sofern nicht anders verordnet, wenden Sie die Tinnitracks Neuro-Therapie täglich für mindestens 90 Minuten in möglichst ruhiger Umgebung an.


*Klinische Studien:
Okamoto, H., & Stracke, H. (2010). <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0911268107>
Pantev, C., Okamoto, H., & Teismann, H. (2012). <http://dx.doi.org/10.3389/fnsys.2012.00050>
Weitere Publikationen: www.tmnmt.com

Wirkung der Therapie

Die persönliche Tinnitus-Frequenz gibt an, welche Areale des Hörzentrums vom Tinnitus betroffen sind.

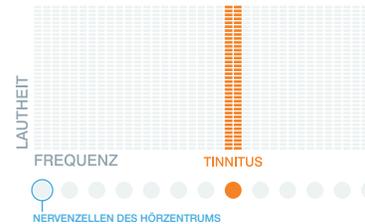

Die Tinnitus-Frequenz wird aus Ihrer Musik gefiltert. Das Hören der gefilterten Musik kann die überaktiven Nervenzellen nachhaltig beruhigen.

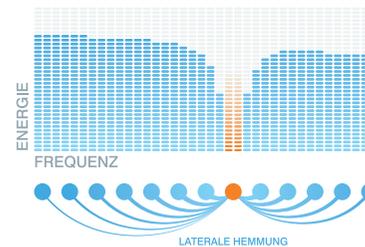

Vom HNO-Arzt verordnet

Mit der Tinnitracks Neuro-Therapie können Sie jetzt etwas gegen Ihren Tinnitus tun! Tinnitracks wird vom HNO-Arzt verordnet und von vielen Krankenkassen erstattet. Ihr teilnehmender HNO-Arzt berät Sie gern zur Behandlung.

Die Neuro-Therapie im Überblick

Therapieziel

Senkung der Tinnitus-Lautstärke

Dauer der Anwendung

12 Monate - 90 Minuten pro Tag

Anwendungsgebiet

Subjektiver chronischer Tinnitus mit einer stabilen Frequenz (tonal)

